



Gebruiksaanwijzing

23319246 Version 1
Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. ©
2017-02-09

Productbeschrijving
Urine-opvangzak


Informatie
Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Let op
Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

Waarschuwingen
Hergebruik van een product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in. Recyclen, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Het product gebruiken


Vorbereitung

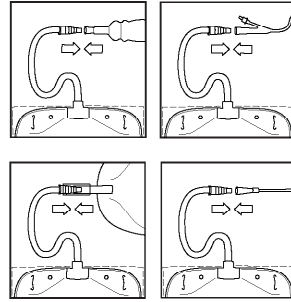

Een nachtzak kan rechtstreeks op een externe katheter of ingebrachte verblijfskatheter worden aangesloten.


De nachtzak kan op een beenzak worden aangesloten voor extra opvangcapaciteit 's nachts. Om een koppeling te maken voor 's nachts moet de beenzak een flexibele opvangslang hebben, waarop de connector van de nachtzak kan worden aangesloten.

Intermitterende katheterisatie
Een nachtzak kan ook worden aangesloten op een intermitterende katheter voor de urine-opvang tijdens zelfkatheterisatie.

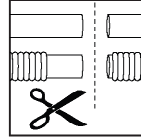


Als de connector niet op de slang is bevestigd, kunt u de slang inkorten tot de gewenste lengte. U kunt de slang gewoon met een schaar afknippen.

Als u een geribbelde slang afknijpt, moet u zo veel mogelijk van het gladde stuk overlaten. Dit zorgt voor een stevige aansluiting tussen de slang en de nachtzak.

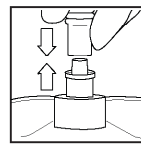


Bevestig de slang aan de zak door het afgesneden uiteinde van de slang stevig op de connector van de zak te duwen.

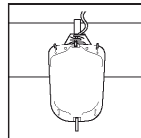


Gebruik een Coloplast hanger of standaard om de nachtzak aan op te hangen.

Maak de zak stevig aan de hanger of standaard vast door ervoor te zorgen dat de haken van de hanger of standaard in de gleuven boven in de zak grijpen. Bevestig de hanger aan de bedrail of plaats de standaard op de vloer naast het bed.

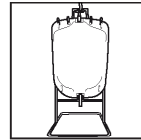

Voor een optimale afvoer is het van belang dat de nachtzak zich in een lagere positie bevindt dan uw eigen positie wanneer u in bed ligt.


Intermitterende katheterisatie
Hang de zak op of plaats de zak op een voor u gemakkelijke plaats en zorg ervoor dat de zak zich in een lagere positie bevindt dan uw onderbuik, ongeacht of u de voorkeur geeft aan zittend, staand of liggend katheteriseren.

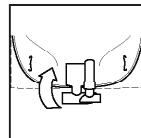

Hygiënisch 2-staps kraantje

Zorg dat het aftapkraantje gesloten is. Sluit het kraantje voorzichtig.

Aansluiten

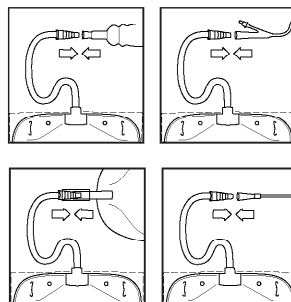

Verwijder de eventueel aanwezige bescherm dop van de connector.


Sluit de connector aan op de externe katheter of ingebrachte verblijfskatheter.

Of sluit de connector aan op de onderzijde van de beenzak bij het aftapkraantje. Open het aftapkraantje van de beenzak.

Het urine-opvangsysteem kan nu gebruikt worden.

Intermitterende katheterisatie
Sluit de connector aan op de intermitterende katheter.

Wanneer u met katheteriseren begint, wordt de urine opgevangen in de nachtzak.

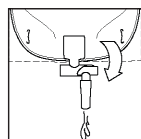

Hygiënisch 2-staps kraantje

We raden aan de zak te legen als hij iets meer dan halfvol is om een optimale afvoer te garanderen.

Intermitterende katheterisatie
Leeg de nachtzak na iedere intermitterende katheterisatie.

Verwijderen

Maak de nachtzak los van de externe katheter of ingebrachte verblijfskatheter.


Of, als de nachtzak aangesloten is op de beenzak: sluit het aftapkraantje van de beenzak. Maak vervolgens de nachtzak los. Raak het open uiteinde van de aftapslang van de beenzak niet aan.

Intermitterende katheterisatie

Maak na voltooiing van de katheterisatie de bedzak los van de intermitterende katheter.

Maak de zak los van de hanger of standaard.

Weggoien

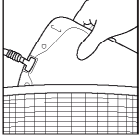

Vervang de zak volgens de lokale richtlijnen en aanbevelingen.

De hanger of standaard van de zak kan worden hergebruikt.

Maak de zak leeg voordat u hem weggooit.

De zak is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met het normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Spoel het product niet door het toilet.