


Attends® Flex




Gebruiksaanwijzing


Vorbereiding

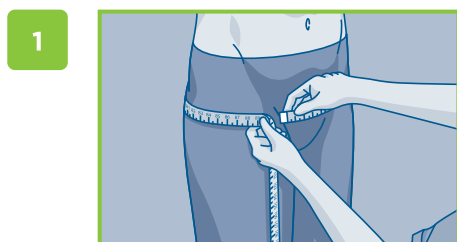

Maak gebruik van het speciale Attends meetlint en meet daarmee de heup of omvang van het middel. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.

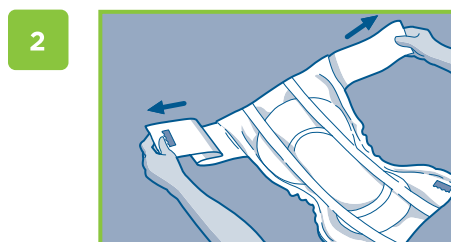

Vouw het product voorzichtig open en rol daarbij de heupbanden uit naar de buitenzijde en leg deze vlak neer zodat er een T-vorm ontstaat. Wees er zeker van dat de achterzijde onder ligt en de zachte, absorberende, bovenzijde met anti-lek randjes naar boven wijst.

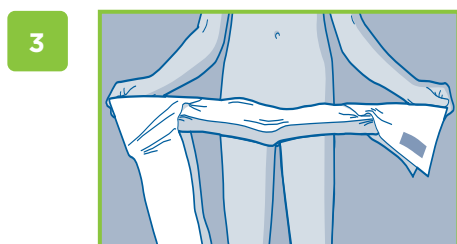

Vouw de inlegger van het Flex product voorzichtig in de lengte richting zodat de anti-lek randjes overeind staan.

Gebruik




Positioneer de heupbanden rondom het middel en maak daarbij gebruik van de blauwe klitteband fixatiepunten zodat deze op zijn plaats blijft.



Breng de inlegger geleidelijk tussen de benen naar voren en zorg ervoor dat de opstaande anti-lek randjes en bootvorm behouden blijft. Trek de inlegger nu hoog op richting de heupbanden en bevestig deze vervolgens.



Strijk de inlegger voorzichtig glad en zorg voor een goede aansluiting op het lichaam. Zodra deze goed gepositioneerd is kan deze worden bevestigd met de blauwe fixatiepunten tegen de heupband.

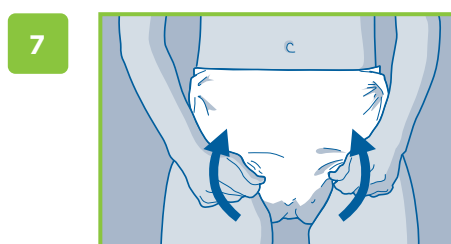

Indien het nodig is, kunt u de inlegger iets verplaatsen zodat de passing beter is voor uw.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

Hints en Tips

Productkeuze

- Maak gebruik van het speciale Attends meetlint en meet daarmee de heup- middelomvang. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.
- De juiste absorptiecapaciteit en het meest geschikte product is afhankelijk van de mate van incontinentie.
- De beslisboom en het numerieke systeem van Attends is daarbij zeer behulpzaam.

Verwisselen

- Controleer de vochtindicator, indien deze voor meer dan de helft (60%) vervaagd is dan is de inlegger verzadigd en dient te worden vervangen.
- Droge en schone inleggers kunnen na het toiletteren opnieuw worden aangebracht.
- Verwijder verzadigde inleggers via de achterzijde indien mogelijk.
- Verschoon en verzorg de huid volgens voorschrift, bij voorkeur van voor naar achteren.
- Gebruik de inleggers niet in combinatie met zalf, olie of poeder omdat deze de absorptiecapaciteit negatief beïnvloeden. Zodoende wordt urine niet volledig opgenomen waardoor de huid mogelijk geïrriteerd en beschadigd raakt.

Aantrekken

- Vouw de inlegger in de lengte richting. Vergeet niet de inlegger recht te plaatsen en de fixatiepunten te plakken op de heupband. Wanneer nodig, kunt u de inlegger nog iets verplaatsen voor een betere pasvorm.
- Zorg ervoor dat de heupband aan de achterzijde zit, zodoende weet u altijd zeker dat het product in de juiste positie aangebracht wordt.
- De vochtindicator zit precies in het midden. Deze kunt u ook gebruiken om het product te correct te centreren.
- Indien de inlegger wordt aangebracht bij een liggend persoon dan is dezelfde volgorde van aanbrengen van toepassing als bij een staande positie.

In geval van doorlekken

- Controleer of het product op de juiste manier is aangebracht en of de juiste absorptiecapaciteit is gebruikt.
- Verhoog alleen de absorptiecapaciteit als u er zeker van bent dat het product juist is aangebracht of wanneer er een verandering is in iemands persoonlijke situatie.

Verwijderen

- Rol de Flex na gebruik op en deponeer deze in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.
- Spoel de Flex na gebruik nooit door het toilet.

Attends Flex



Attends Flex is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be