


## Gebruiksaanwijzing


# Qufora® Hulp- en zorgprogramma Irrigatiesysteem met ballonkatheter

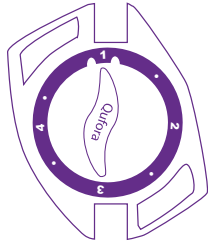

### Controle unit


Draai de controle unit naar positie 1,2,3 en 4 in overeenstemming met hoe de irrigatie procedure vordert.

1

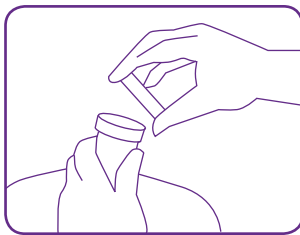


Vul de waterzak met lauwwarm water (36° C - 38° C). Sluit daarna de waterzak af met de schroefdop.

2

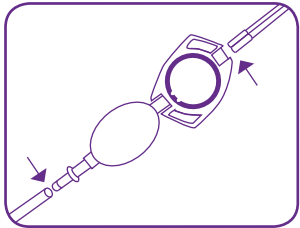


Bevestig de slang van de waterzak aan de handpomp. Bevestig het witte uiteinde van de slang aan de controle unit.

3

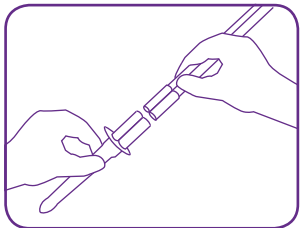


Bevestig het grijze uiteinde van de slang aan de katheter.

4

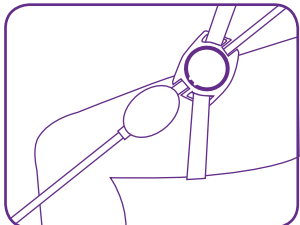


De controle unit kan, indien gewenst, worden bevestigd aan het bovenbeen met de beenband.

5

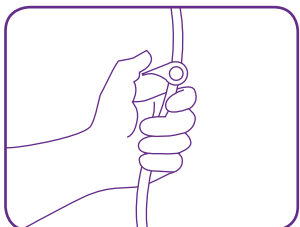


**Zet de controle unit op positie 1.** Open het ventiel op de waterzak.

6

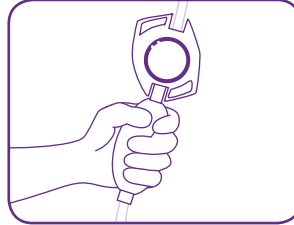


Pomp tot er water uit de katheter komt, ter ontluchting van het systeem. Zorg dat de handpomp volledig gevuld is met water. **Draai de controle unit naar de positie tussen 1 en 2.**

7

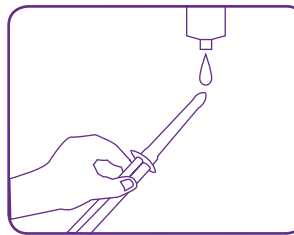


Smeer de top van de katheter in met glijmiddel op waterbasis.

8

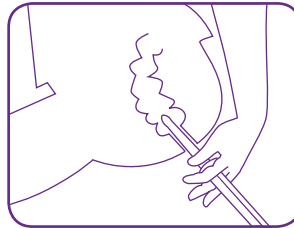


Voer de katheter in de endeldarm, tot aan de 'stop-schijf' aan het einde van de katheter.

9

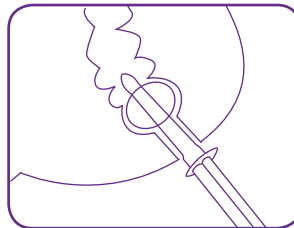


**Draai de controle unit verder door naar positie 2.** Pomp water in de ballon.

10

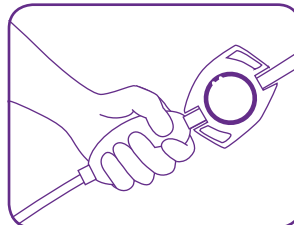

**Draai de controle unit verder door naar positie 3.** Het water stroomt in de darm( zwaartekracht). Indien nodig kan men de handpomp gebruiken.

11

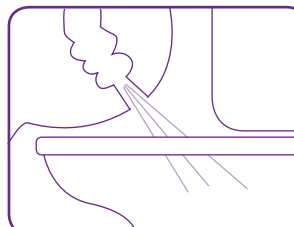

**Draai de controle unit naar positie 4.** Blijf op het toilet zitten. De ballon loopt leeg – u kunt nu de katheter verwijderen. Sluit het ventiel (zie plaatje 5).