



STAPPENKAART

**MAAK HET JEZELF
MAKKELIJK**

Bloedglucose meten



Was je handen goed met warm water en zeep en droog deze grondig af. De meter wordt ingeschakeld als je de strip in de meter steekt. Het metalen uiteinde van de strip moet in de meter worden gestoken.



Als een knipperend druppel-symbool verschijnt, moet een vingerprik met de prikpen worden uitgevoerd.



Breng het druppeltje bloed aan op de gele rand van de teststrip. Verwijder je vinger van de teststrip als het knipperende zandloper-symbool op de display verschijnt.



Het testresultaat verschijnt binnen 4 seconden op de display. De pijl geeft aan of je testresultaat boven, binnen of onder het streefwaardenbereik ligt. Blauw: boven streefwaarden
Groen: binnen streefwaarden
Rood: onder streefwaarden



Met de twee knoppen aan de rechterzijde van de meter kun je:

- De tijd en datum aanpassen op de meter
- De laatst gemeten resultaten bekijken
- De gemiddelde meetresultaten bekijken

Voor meer informatie hierover raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



Druk voor het automatisch uitwerpen van de teststrip op de knop aan de linkerzijde van de meter.

